

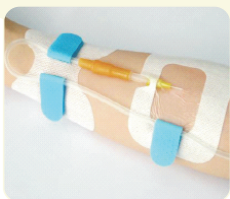
Catheter Securement Device

导管固定装置



Types --类型

- Adult/Pediatric Foley Catheter Securement Device
成人/儿童导尿管固定装置
- Universal large catheter securement device
通用导管固定装置
- Universal CVC Securement Device
通用中心静脉导管固定装置
- Universal PICC Securement device
通用经外周静脉穿刺中心静脉管固定装置
- Nasal Gastric Securement Device
鼻管固定装置
- Dialysis Fistula Needle Securement Device
透析瘘管针固定装置



Features--特点

- Soft and flexible fabric design improves patient comfort
柔软灵活的面料设计提高了患者的舒适度
- Provides superior securement for both horizontal and vertical lifting accidental pulls
为水平和垂直提升意外拉力提供出色的保护
- Simple to apply, inspect and adjust
易于应用，检查和调整
- Hypoallergenic, breathable and latex-free to reduce the risk of allergic reactions and skin irritation
低致敏性，透气性和不含乳胶，可减少过敏反应和皮肤刺激的风险

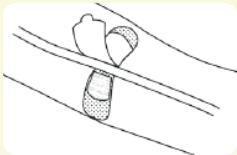
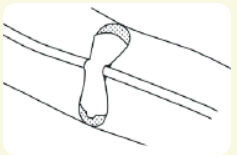


Tel:86-20-85295649 Fax:86-20-85295797 <http://www.yafho.com> E-mail:info@yafho.com

单张尺寸：205X280mm
材 料：200克铜版纸

正面

Application--使用方法

- Select the area for the placement of the securement device. Note:
The line or tube should be already inserted in the patient.
选择固定装置的放置区域。注意：管线或管子应已插入患者体内。
- Prepare the skin according to the standard hospital protocol.
Skin prep or hair removal may be required on some patients for better adhesion.
应根据医院标准准备贴敷固定装置。
一些患者可能需要进行皮肤保护或脱毛，以获得更好的附着力。
- Open the top flap, remove the interior liner and hold the flap open.
打开最顶层，移除内衬，然后将毛面保持打开状态。
- Slide the securement device under so that the line or tube is in the center of the exposed adhesive.
将固定装置滑到下方，使管线或管位于裸露粘合剂的中心。
- Secure the top flap over the line or tube and apply gentle pressure to the center fabric area over the adhesive.
将顶部毛面固定在管线或管子上，并向粘合剂上方的中心区域施加轻微的压力。
- Hold the securement in position while removing the paper backing from one side, then the other, to secure on the skin surface.
从一侧取下纸背，然后从另一侧取下纸背，将其固定在适当的位置，以固定在皮肤表面上。

Ordering information 订货信息					
Item 货品	Silicone 硅胶款	Normal 普通款	Size(cm) 尺寸	Package 包装方式	Remarks 备注
Catheter Securement Device 导管固定装置	600611	600311	16.8x5.7	100pcs×10boxes, 1000pcs/ctn	For fixing Adult Foley catheters 用于成人固定导尿管
	600653	600353	9x5	100pcs×10boxes, 1000pcs/ctn	For fixing Pediatric Foley catheters 用于小孩固定导尿管
	600626	600326	6.5x10.5	100pcs×10boxes, 1000pcs/ctn	For fixing Adult Foley catheters 用于成人固定导尿管
	/	601106	70x3.5	12pcsx20boxes, 240pcs/ctn	Foley catheters securement device without adhesive 导尿管固定，不含胶水， 适合对胶水过敏者
	600613	600313	9x3.5	50pcs×20boxes, 1000pcs/ctn	For fixing PICC/CVC 用于固定中心静脉导管
	600616	600316	9x3.5	50pcs×20boxes, 1000pcs/ctn	
	600621	600321	4x9.2	30pcs×36boxes, 1080pcs/ctn	
	600623	600323	6x7	50pcs×36boxes, 1800pcs/ctn	
	600636	600336	8x12	100pcs×8boxes, 800pcs/ctn	
	6006371	6003371	6.9X8.8	100pcs×8boxes, 800pcs/ctn	For fixing Nasal Gastric tubes 用于固定鼻胃肠管
	/	600330	6x8	100pcs×20boxes, 2000pcs/ctn	
	600650	600350	11x4.2	100pcs×10boxes, 2000pcs/ctn	
	600649	600349	9x5(7.5x3.5)	100pcs×10boxes, 1000pcs/ctn	For fixing universal femoral and radial catheter 用于通用股骨和桡骨导管
	600612	600312	16.8x5.7	100pcs×10boxes, 1000pcs/ctn	For lines and tubes 用于固定导管或者线形器械
	600614	600314	9x3.5	100pcs×20boxes, 2000pcs/ctn	
600615	600315	7.7X2.2	100pcs×20boxes, 2000pcs/ctn		
Customized is available 其他规格可定制					

Manufacturer: Yafho Bio-Technology Co.,Ltd

生产商：台山市弘毅医疗用品有限公司

Add: No.12, 9Rd, Changlong Ind. Zone, Taishan city, Guangdong, China

地址：广东江门台山市四九镇长龙工业区九路十二号之一

Tel: 86-020-85295649

Fax: 86-020-85295797

电话：86-20-85295649

传真：86-20-85295797

www.yafho.com

Yafho
WOUND CARE

Tel:86-20-85295649 Fax:86-20-85295797 http://www.yafho.com E-mail:info@yafho.com